

Urinalysen




Anleitung

Lieferumfang



1 Testanleitung

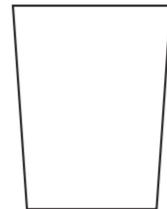


1 Urinbecher
(optional)




1 Urin-Monovette®
mit Plastikspitze




1 RigidSafety-
Bag®

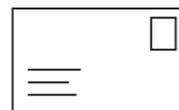

1 Rücksende-
couvert

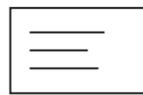

Etiketten zum
Beschriften

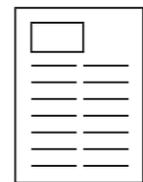

Auftragsformular



Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Bitte vor der Urinsammlung diese Testanleitung sorgfältig durchlesen.
- Testkit für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.
- Achtung, nicht beschriftete Urinproben werden vernichtet.

Hinweise zur Testdurchführung

- Nicht unmittelbar nach grosser körperlicher Anstrengung.
- Nicht während oder kurz nach der Menstruation.
- Nicht bei Blasenentzündung.
- Urinproben nicht direktem Sonnenlicht oder Wärme aussetzen.

Hinweise zum Probenversand

- Nur zwischen Montag und Donnerstag und nicht vor Feiertagen.
- Urinprobe noch am selben Tag an SwissAnalysis zurückschicken.
- Bei Hitze oder Frost die Urinprobe direkt am Postschalter abgeben.



Bei Bestellung über den Online-Shop analysis-swiss.ch liegen keine Etiketten/Auftragsformular zum Beschriften bei. Die notwendigen Etiketten sind schon mit einem Barcode versehen und auf den notwendigen Utensilien aufgebracht.

Erster Morgenurin

Verwenden Sie für die Analyse bitte den 1. Morgenurin

Zweiter Morgenurin

Nach dem Aufstehen normal zur Toilette gehen. Diesen ersten Morgenurin **nicht** sammeln. Danach normal frühstücken. Nicht mehr als 0,3 Liter trinken. Kaffee ist vor der Urinprobe nicht erlaubt. Den nächsten Urin, d.h. den **zweiten Morgenurin** sammeln. Dieser wird im Laufe des Vormittags nach dem ersten Morgenurin, meistens zwischen 10 und 12 Uhr, spontan ausgeschieden.

Spontanurin

Verwenden Sie für die Analyse bitte den Spontanurin (nicht nüchtern, Uhrzeit egal)

Erster Morgenurin, Zweiter Morgenurin, Spontanurin

- Es wird immer der **Mittelstrahlurin** gesammelt, d.h. die erste Portion Urin wird ausgeschieden und ohne Unterbrechung des Harnstrahls wird die zweite Portion Urin im Gefäss gesammelt.
- Das Gefäss darf dabei den Körper nicht berühren.
- Der restliche Urin wird wieder normal ausgeschieden.

Vorbereitung



Urinbecher

Für die Urinprobe einen Urinbecher oder ein sauberes und trockenes Gefäss benutzen.




Hände waschen

Vor der Urinsammlung die Hände gut mit Wasser und Seife waschen.


SwissAnalysis AG
Hauptstrasse 137 D
CH-8274 Tägerwilen
swissanalysis.ch

Entnahme

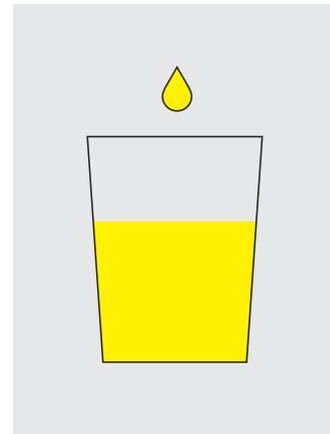


1. Urin auffangen

Den ersten, zweiten oder Spontanurin sammeln

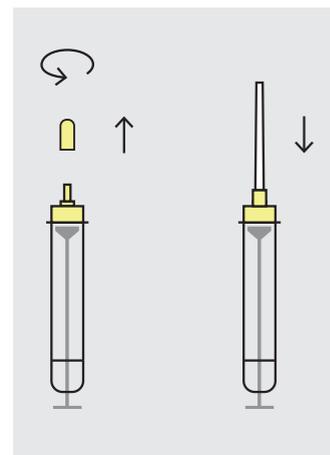


2. Spitze aufsetzen

Danach die Urin-Monovette® nehmen, den kleinen vorderen Verschluss entfernen und die gelbe Plastikspitze aufsetzen. Den Verschluss aufheben.

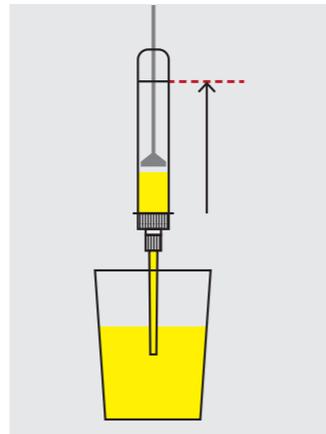


3. Urin-Monovette® befüllen

Die gelbe Plastikspitze ins Gefäss eintauchen und die Urin-Monovette® aufziehen, bis sie bis zur Basislinie gefüllt ist.

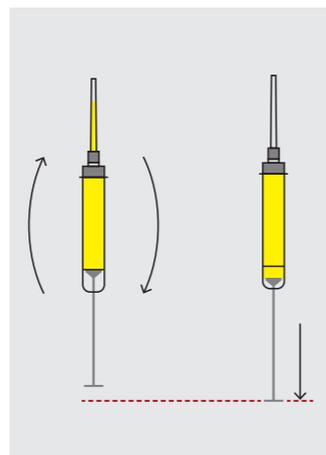


4. Spitze entleeren

Mit der Plastikspitze nach oben, die Urin-Monovette® senkrecht halten und den Kolben bis zum Anschlag nach unten ziehen, bis die Plastikspitze leer ist.

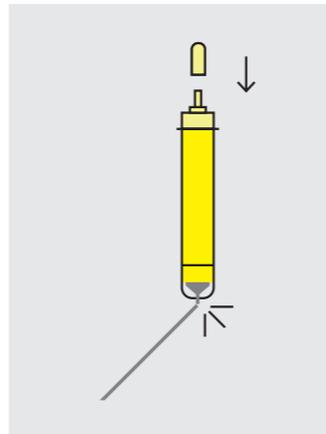

5. Stange abknicken

Die gelbe Plastikspitze abziehen und die Kolbenstange abknicken. Dann den Verschluss wieder gut aufsetzen.

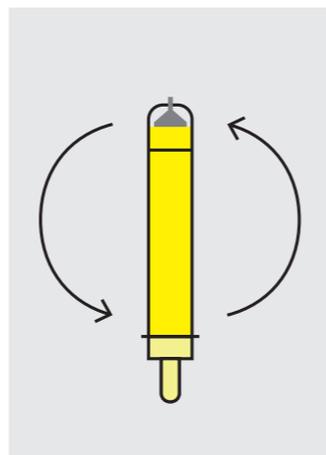


6. Schwenken

Die Urin-Monovette® 4 - 5 mal über Kopf schwenken.



7. Entsorgung

Den restlichen Urin im Gefäss schütten Sie bitte in die Toilette. Das leere Gefäss und die Plastikspitze können im Hausmüll entsorgt werden.

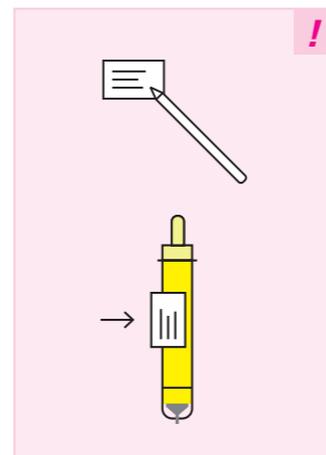


Etikett beschriften

Etikett in DRUCKBUCHSTABEN mit Namen, Datum und Entnahmezeit beschriften.


Beschriftetes Etikett erst nach der Urinprobe in Längsrichtung auf die Urin-Monovette® kleben.

Versand

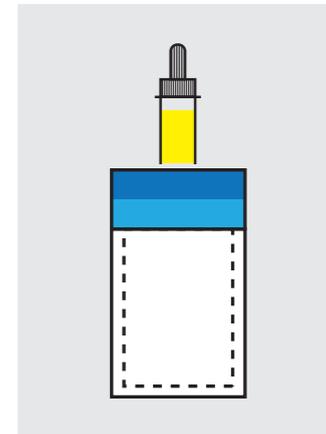

Probe in RigidSafetyBag®

Die gut verschlossene Urin-Monovette® in das RigidSafetyBag® legen.

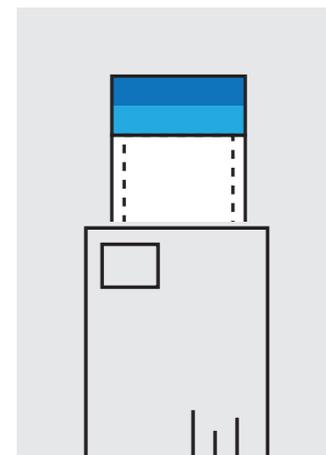

Einsenden

Den RigidSafetybag® in das Rücksendecouvert legen und noch am selben Tag an SwissAnalysis zurückschicken.

Bis zum Versand die Urinprobe im Kühlschrank (nicht im Gefrierfach) lagern.